

2021年6月28日

各位

東京都新宿区原町 3-61  
アクロバイオ株式会社  
Tel : 03-5272-0621 Fax : 03-5272-0623

## Capintec 社製 RI ドーズキャリブレーション

### ルテチウム 177 のキャリブレーション番号について

この度、ルテチウムオキシドトレオチド ( $^{177}\text{Lu}$ ) 注射液が発売されるにあたり、Capintec 社製 RI ドーズキャリブレーションでルテチウム 177 を測定する際のキャリブレーション番号をご連絡いたします。

核種名：ルテチウム 177 ( $^{177}\text{Lu}$ )

半減期：6.71 日

キャリブレーション番号：459 × 10

核種とキャリブレーション番号の登録方法については

・ CRC-55tR / CRC-55tW

「Cal\_55tR\_Lu-177 変更手順書」

・ CRC-25R / CRC-25W

「Cal\_25R\_Lu-177 変更手順書」

・ CRC-15R / CRC-15W

「CRC-15R\_前期型\_Lu-177 追加手順書

もしくは CRC-15R\_後期型\_Lu-177 追加手順書」

を参照して下さい。

以上