


F-18 用新キャリブレーション番号の追加登録方法


対象機器：CRC-15PET/25PET 型

F-18 用核種ボタンに登録されている従来のキャリブレーション番号(455)は残したまま、任意のユーザーキーに新しい番号(480)を追加登録する手順は以下の通りです。

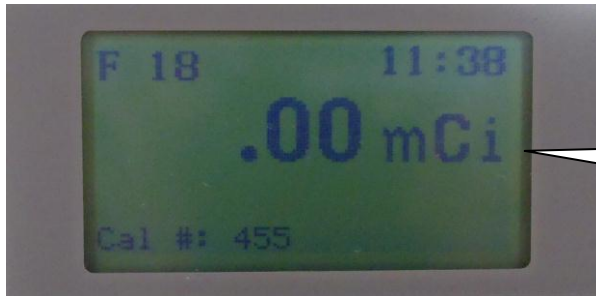

メイン画面(測定画面)が表示されていない場合は、HOME ボタンを押してメイン画面を表示して下さい。

↓ UTIL ボタンを押します。

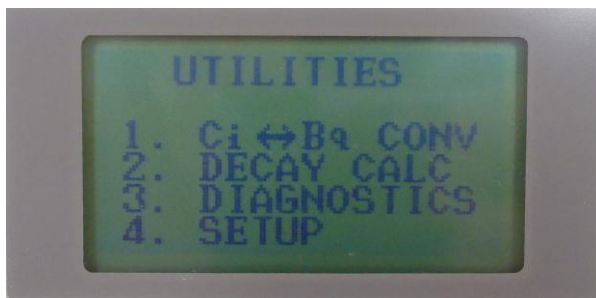


↓ SETUP を選択して下さい。




↓ OTHER を選択して下さい。


パスワードは、S/N(製造番号)の下3桁です。パスワードは機器後部に刻印されています。

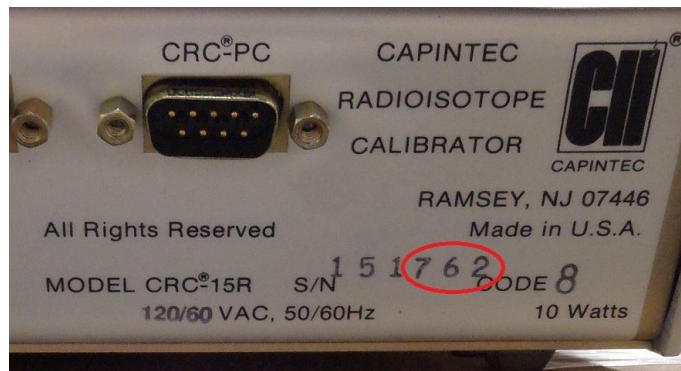


↓ パスワードを入力し、ENTER ボタンを押して下さい。

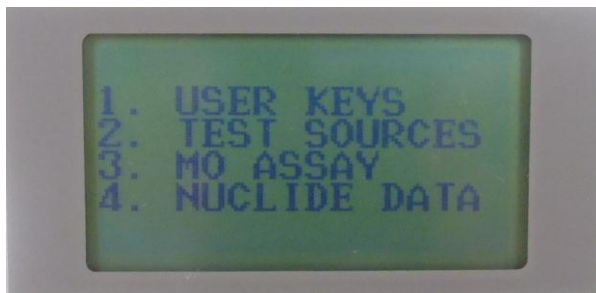

↓ NUCLIDE DATA を選択して下さい。

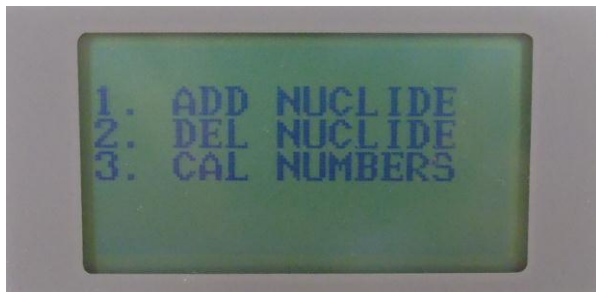


↓ ADD NUCLIDE を選択して下さい。

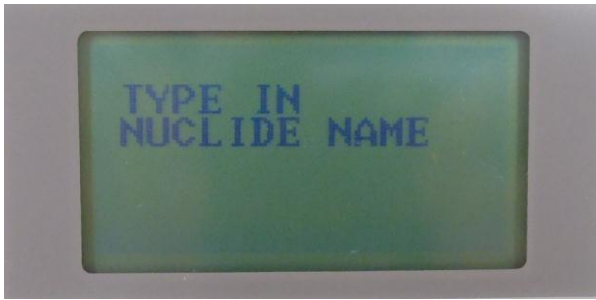


「3、SPC、2、1、8」の順に
押すと、FA18と入力されます。


↓ FA18と入力して下さい。

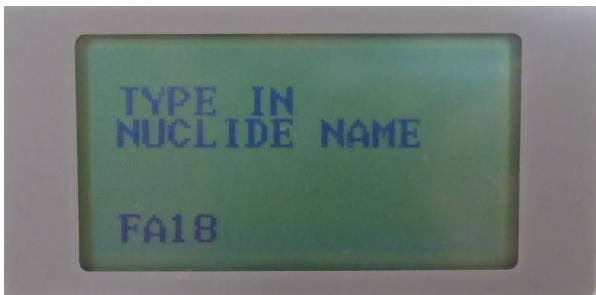


↓ ENTER ボタンを押して下さい。

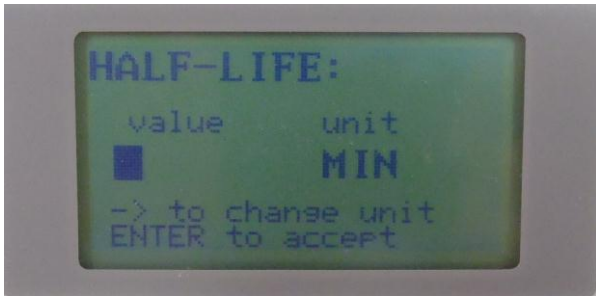


↓ 109.7を入力して下さい。

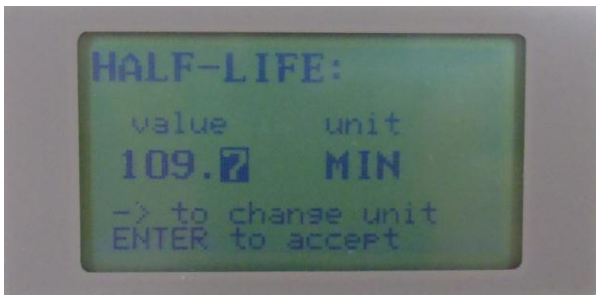


↓ unit が MIN になるまで、SPC ボタンを押して下さい。

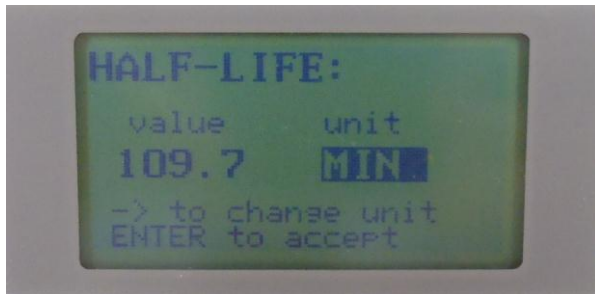


↓ ENTER ボタンを押して下さい。

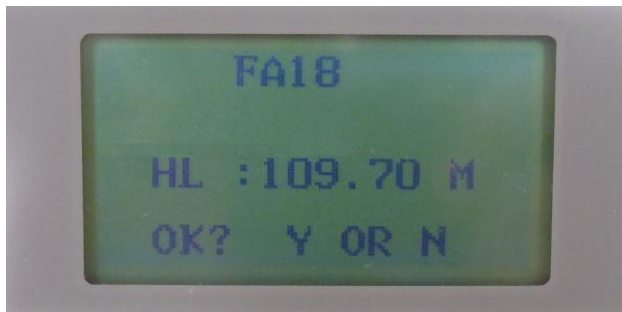

↓ Y を選択して下さい (「9」ボタンを押して下さい)。

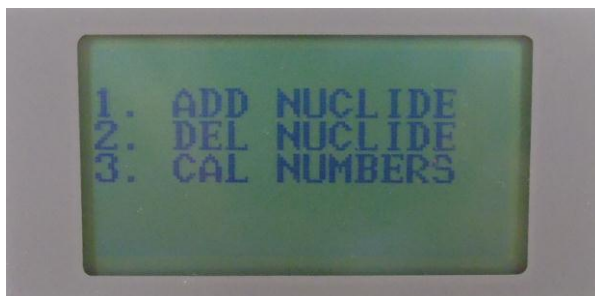


↓ CAL NUCLIDE を選択して下さい。

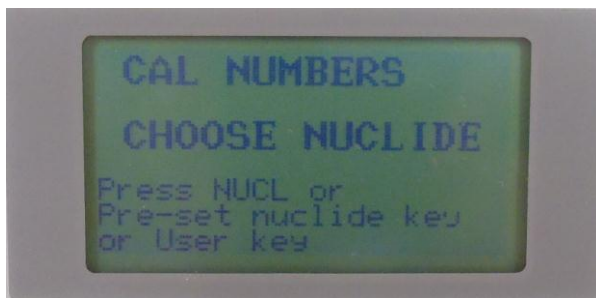


↓ NUCL ボタンを押して下さい。




↓ 3 2 1 8を入力して下さい。

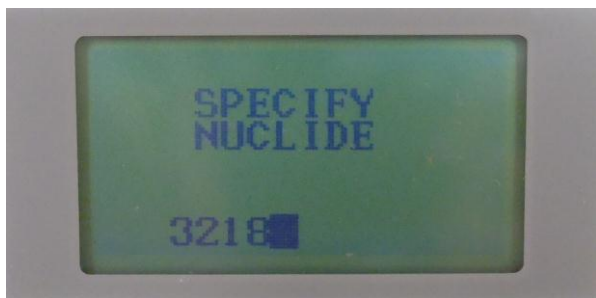


↓ ENTER ボタンを押して下さい。

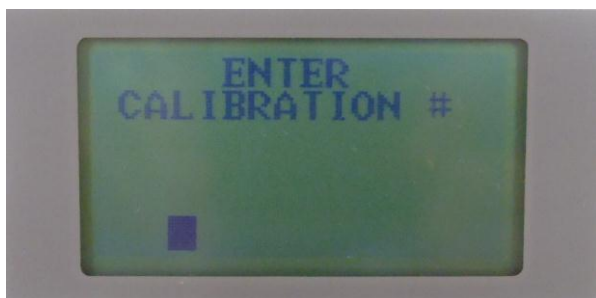


↓ 480を入力して下さい。

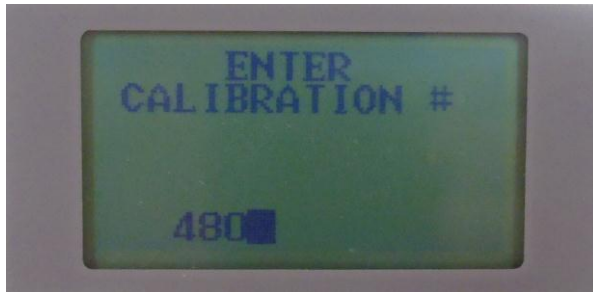


↓ ENTER ボタンを押して下さい。

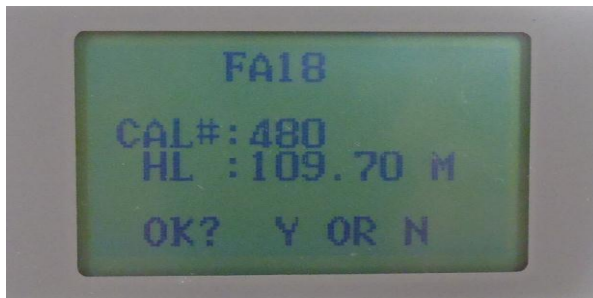


↓ Yを選択して下さい（「9」ボタンを押して下さい）。

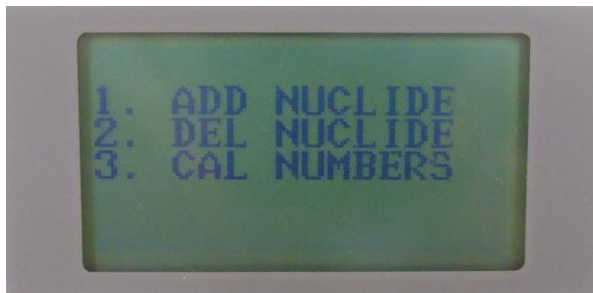


↓ UTIL(または MENU)ボタンを押して下さい。

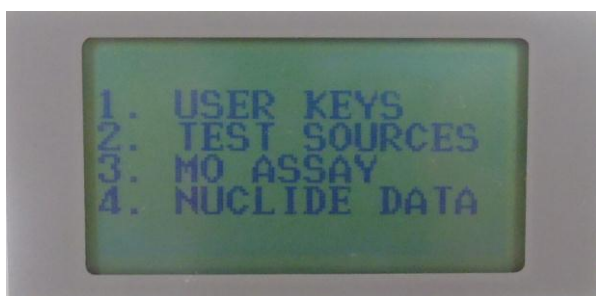


↓ USER KEYS を選択して下さい。

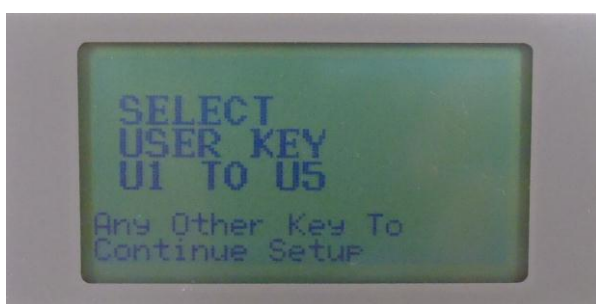

↓ F-18 を登録したいユーザーボタンを選択して下さい。

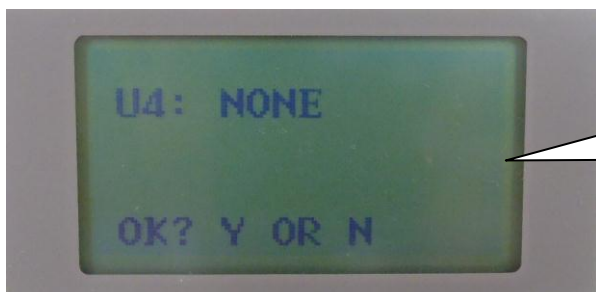


選択したユーザーボタンに核種データが登録されていない場合、この様な画面が表示されます。

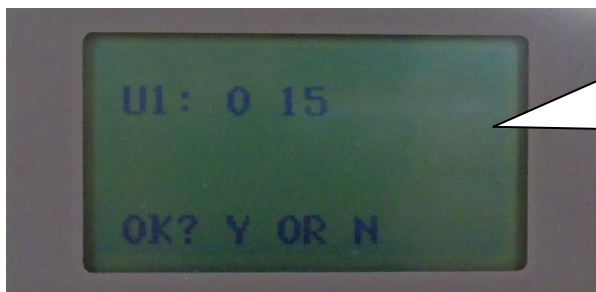


選択したユーザーボタンに核種データが登録されている場合、登録済データが表示されます。この様なユーザーキーに新しいデータを登録すると、古いデータ(左図の場合は 0-15)が削除されますので注意して下さい。


↓ N を選択して下さい (数字ボタン「6」を押して下さい)。

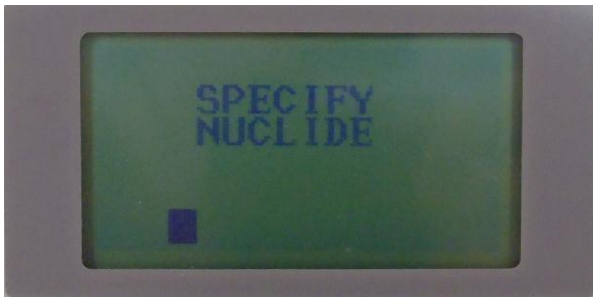


↓ 3 2 1 8を入力して下さい。

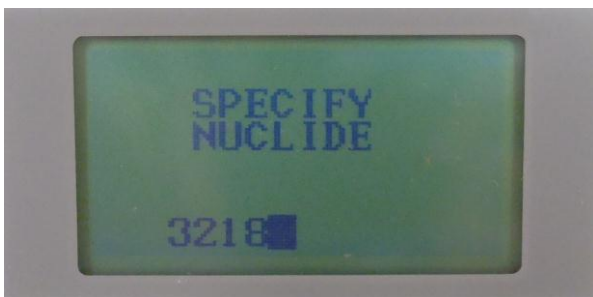


↓ ENTER ボタンを押して下さい。

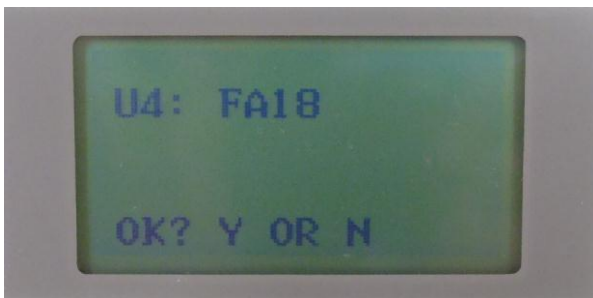

↓ Yを選択して下さい (「9」ボタンを押して下さい)。

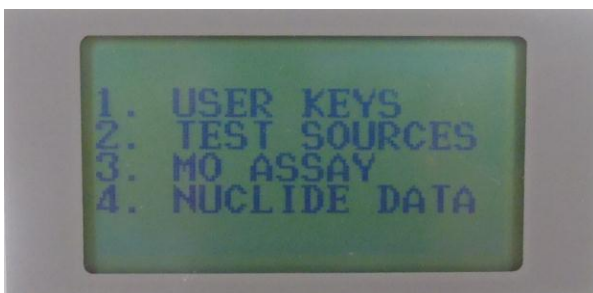

↓ HOME ボタンを押して下さい。元の測定画面に戻ります。

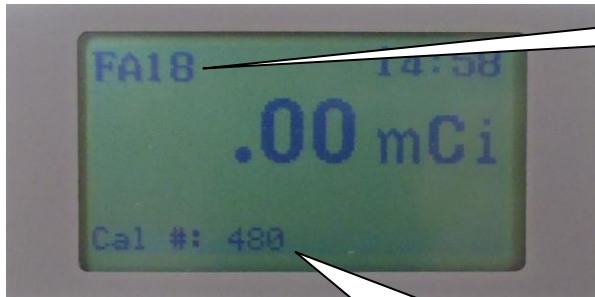

FA18 が選択されていることを確認して下さい。

画面下の数値が、480に変更されていることを確認して下さい。以上で設定変更は完了です。