


## F-18 用新キャリブレーション番号の変更または追加登録方法


対象機器：CRC-15R 型（ソフトウェアリビジョンが古いもの）

F-18 用新キャリブレーション番号(472)を登録する手順は以下の通りです。

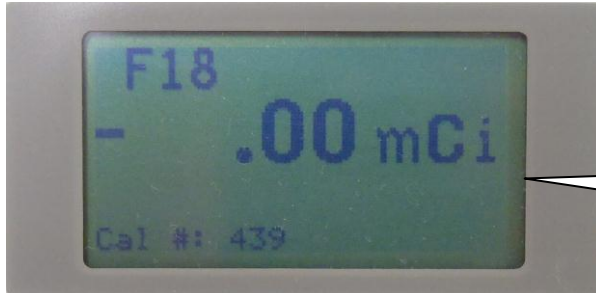


メイン画面(測定画面)が表示されていない場合は、HOME ボタンを押してメイン画面を表示して下さい。

↓ UTIL ボタンを押します。

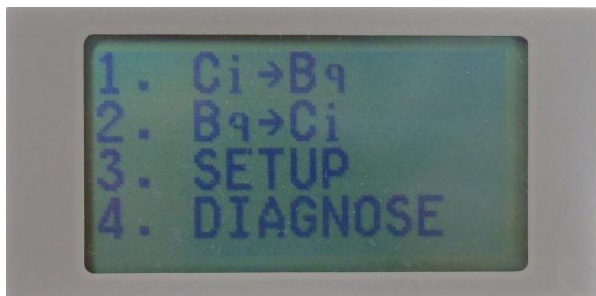


↓ SETUP を選択して下さい。

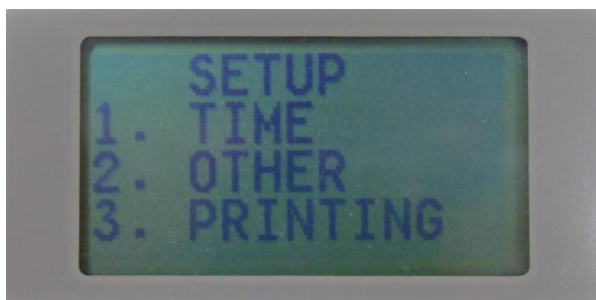


↓ OTHER を選択して下さい。


パスワードは、S/N(製造番号)の上3桁です。パスワードは機器後部に刻印されています。

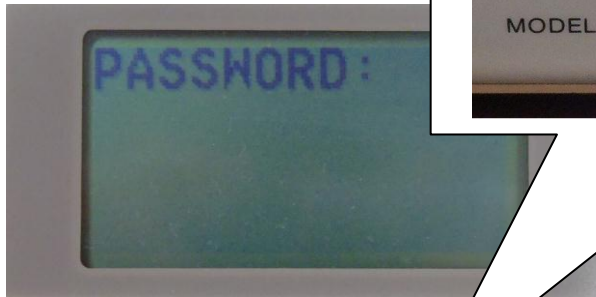


↓ パスワードを入力し、ENTER ボタンを押して下さい。

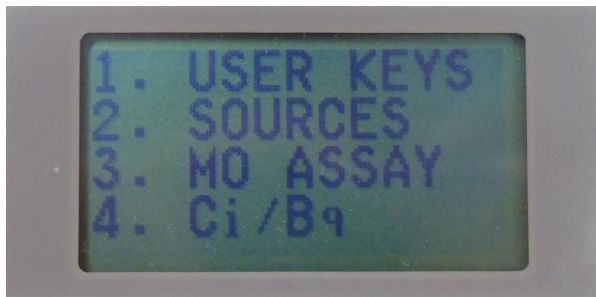


↓ USER KEYS を選択して下さい。

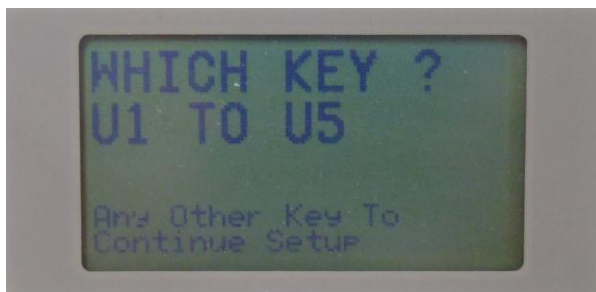

↓ F-18 を登録したいユーザーボタンを選択して下さい。

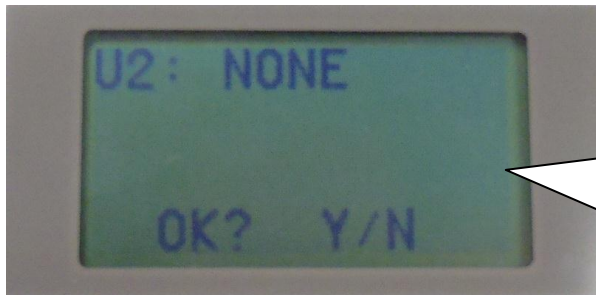


選択したユーザーボタンに核種データが登録されていない場合、このような画面が表示されます。従来の番号(439)を残したまま新しい番号(472)を追加登録する場合は、このような核種未登録のユーザーキーを選んで下さい。

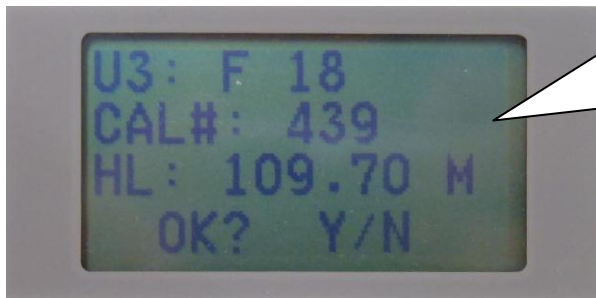


選択したユーザーボタンに核種データが登録されている場合、登録済データが表示されます。この様なユーザーキーに新しいデータを登録すると、古いデータ(左図の場合は F18)が削除されますので注意して下さい。


↓ N を選択して下さい (数字ボタン「6」を押して下さい)。

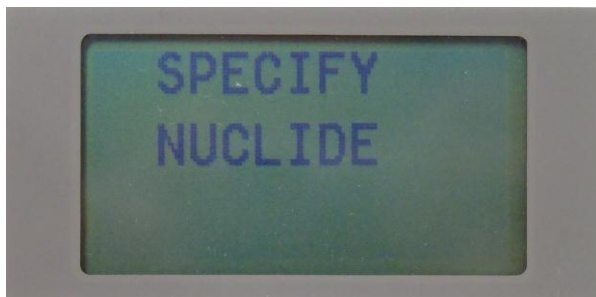


↓ 3 1 8 を入力して下さい。

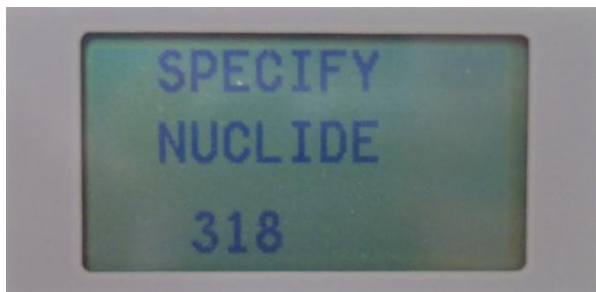

↓ ENTER ボタンを押して下さい。

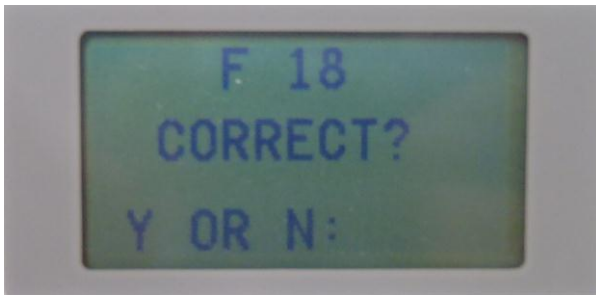


↓ N を選択して下さい（「6」ボタンを押して下さい）。

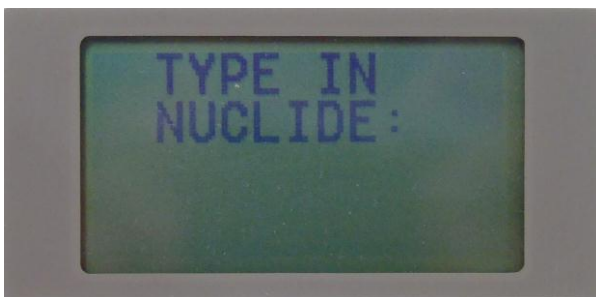


「3、SPC、1、1、8」の順に  
押すと、F 18 と入力されます。

↓ F 18 と入力して下さい。

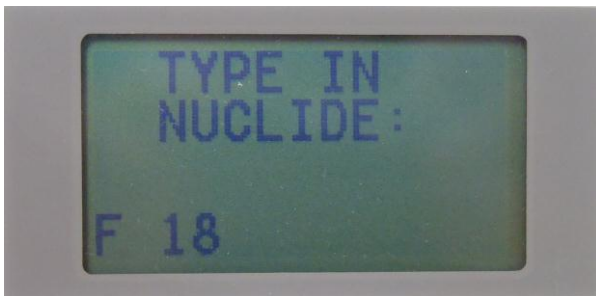


↓ ENTER ボタンを押して下さい。

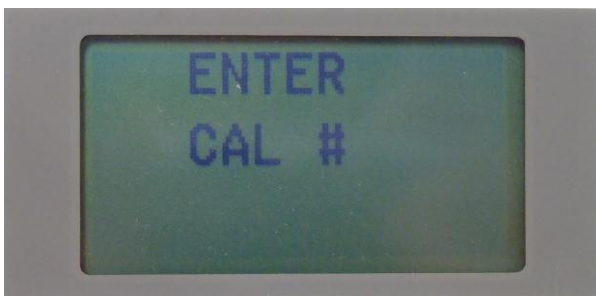


↓ 472を入力して下さい。




↓ ENTER ボタンを押して下さい。

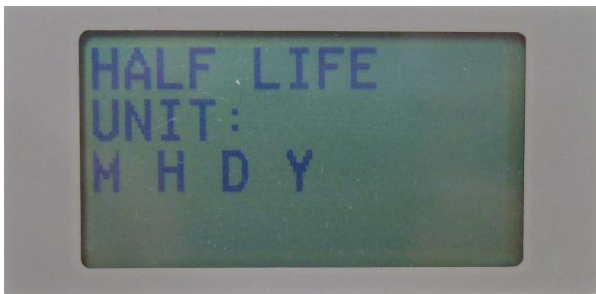

↓ Mを選択して下さい（「6」ボタンを押して下さい）。

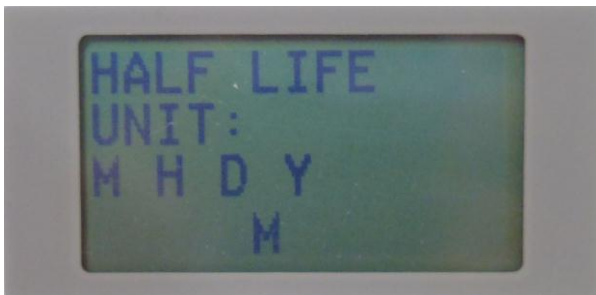


↓ ENTER キーを押して下さい。

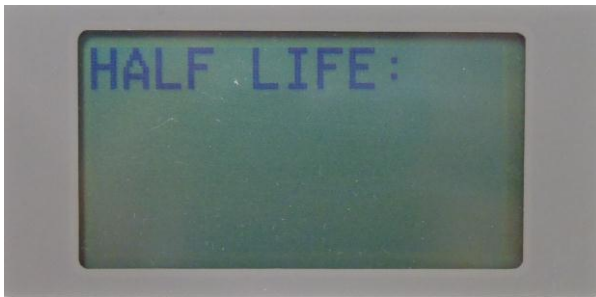


↓ 109.7を入力して下さい。




↓ ENTER ボタンを押して下さい。

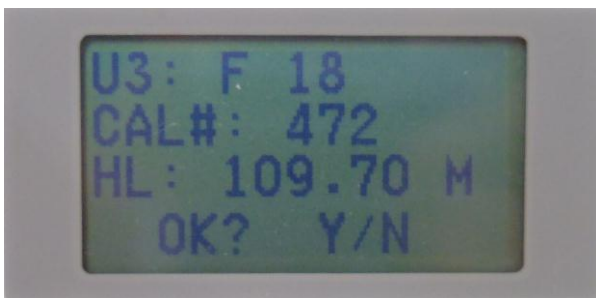

↓ Yを選択して下さい（「9」ボタンを押して下さい）。

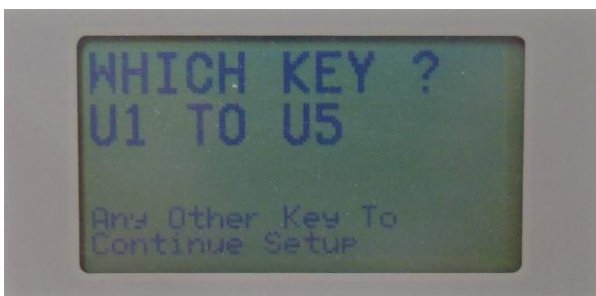

↓ HOME ボタンを押して下さい。元の測定画面に戻ります。

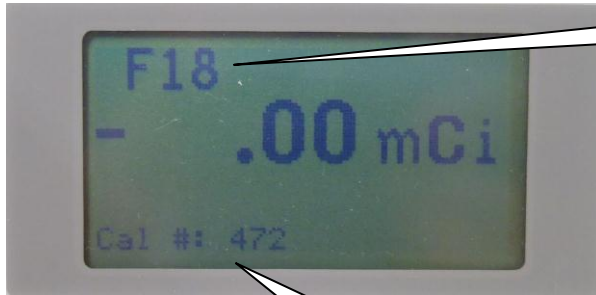

F18 が選択されていることを確認して下さい。

画面下の数値が、472に変更されていることを確認して下さい。以上で設定は完了です。